

ООО «Мизомела»
ИНН/КПП: 9718047844/771801001
Телефон: +7-(495)-135-35-32
Сайт: <https://mizomed.ru/>
E-mail: info@mizomed.ru

mizomed



Руководство пользователя
Для косметологического кресла MIZOMED MZ 3582

Содержание:

1. Назначение изделия
2. Комплектация
3. Технические характеристики
4. Сборка и эксплуатация
5. Уход за изделием
6. Гарантия изготовителя

1. Назначение изделия

Косметологическое кресло MIZOMED MZ 3582 предназначено для различных видов массажа, косметологических и лечебных процедур.

2. Комплектация

В комплект входит: косметологическое кресло, подушка, подлокотники, пульт управления, руководство пользователя.

Изделие поставляется в многослойном гофрокартоне.

Вес изделия с упаковкой: 45,3 кг

Размер упаковки: 146*63*63 см

3. Технические характеристики

Основные технические характеристики косметологического кресла приведены в таблице 1.

| | |
|---|---------------------------------|
| Артикул | MZ 3582 |
| Количество секций | 3 |
| Длина, см | 187 |
| Ширина, см | 60 |
| Ширина с учетом подлокотников, см | 77 |
| Размер люверса, см | 13*13 |
| Минимальная высота ложе в горизонтальном положении, см | 61,5 |
| Максимальная высота ложе в горизонтальном положении, см | 83,5 |
| Диапазон изменения угла наклона спинной секции, гр | 0-80 |
| Диапазон изменения угла наклона ножной секции, гр | 0-(-80) |
| Максимальная распределенная нагрузка, кг | 200 |
| Высота наполнителя, см | 9,5 |
| Тип наполнителя | Пенополиуретан |
| Тип покрытия | ПУ-кожа |
| Количество электроприводов | 1 |
| Тип регулировки высоты кресла | Электропривод |
| Тип регулировки спинной секции | Переставление упора на гребенке |
| Тип регулировки ножной секции | Переставление упора на гребенке |
| Масса нетто, кг | 39,9 |
| Масса брутто, кг | 45,3 |
| Размер упаковки, см | 146*63*63 |

Таблица 1.

4. Сборка и эксплуатация

Перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не пользуйтесь изделием в течение 2-х часов после перевозки при минусовой температуре. Эксплуатация изделия при минусовой температуре запрещена.
- Не допускается чрезмерная нагрузка на подлокотники и подголовник. Они предназначены

только для комфортного расположения головы и рук пациента. На подлокотниках нельзя сидеть, стоять, опираться, садясь/вставая с кресла.

- Не опускайте спинную секцию ложемента (для кресел с регулировкой угла наклона спинной части ложемента) прикладывая усилие к подголовнику. Опирайтесь только на сам ложемент. В противном случае механизм регулировки и/или крепления подголовника может не выдержать.
- Будьте внимательны, пользуясь острыми предметами, т.к. они могут повредить покрытие кресла.
- Перед первым использованием и не реже одного раза в три месяца (при интенсивной эксплуатации по мере необходимости) проверяйте и затягивайте все резьбовые соединения и рукоятки во избежание их потери.
- Регулярно смазывайте металлические соединения для предупреждения возникновения скрипов и прочих посторонних звуков.
- Перед использованием необходимо произвести осмотр изделия, на наличие видимых дефектов и неисправностей. В случае обнаружения дефектов немедленно прекратить эксплуатацию изделия и обратиться в ближайший сервисный центр. Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения настоящих условий!

Сборка:

1. Откройте упаковку (будьте аккуратны при вскрытии упаковки используя острые предметы).
2. Вытащите кресло и его комплектующие из упаковки и установите его на ровную поверхность.
3. Освободите кресло и все комплектующие от защитных пленок и хомутов.
4. Вставьте подлокотники как показано на рисунке 1.
5. Подключите кресло в розетку к электросети.

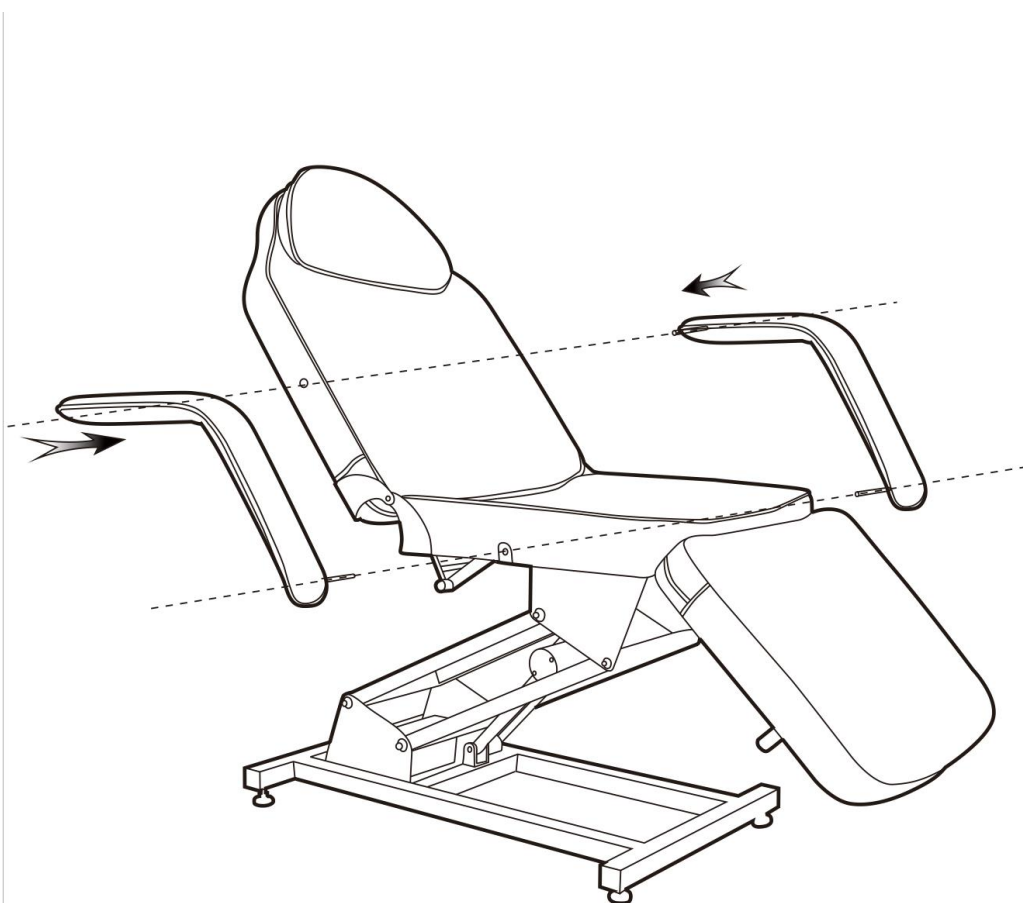


Рисунок 1.

5. Уход за изделием

- Избегайте хранения Вашего кресла в очень холодных условиях. Чрезмерный холод вызовет трескание покрытия.
- Оберегайте изделие от повышенного теплового воздействия. Чрезмерное тепловое воздействие вызовет растяжение и появление складок и морщин на покрытии. Таким образом держите кресло подальше от обогревателей, электрообогревателей, избегайте попадания на покрытие прямого солнечного света.
- Не перегружайте кресло за пределы его максимальной нагрузки, максимально возможная нагрузка на столы приведена в таблице 1.
- Не используйте средства с содержанием спирта и щелочи, они могут с течением времени привести к образованию трещин. Мы рекомендуем протирать стол слабым тёплым мыльным раствором.
- Обязательно используйте чехол или одноразовые простыни для защиты покрытия кресла и продления его срока службы.
- Используйте одноразовые простыни для продления срока службы покрытия кресла. Мы предлагаем Вам использовать покрытие из 100%-ого хлопка для предотвращения образования масляных пятен на покрытии кресла. Так же рекомендуется использовать такое покрытие и для подголовника и подлокотников.
- Используйте смазку с высокой проникающей способностью (например: смазку для цепей, петель и замков; прим.: не входит в комплект поставки) для обработки соединений с целью уменьшения возможных скрипов и посторонних звуков.

6. Гарантия изготовителя

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи; исключение быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в компании ООО «Мизомела» с применением только оригинальных запчастей и деталей.

Дата продажи: «___» _____ 20 г.

ООО «Мизомела»

| Дата | Отметка сервисного центра | Подпись/печать покупателя | Примечание |
|------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | <hr/> ФИО/М.П | |
| | | <hr/> ФИО/М.П | |